

# 细菌性阴道病联合检测 试剂盒 (干化学酶法)

一卡6联检:细菌性阴道病、滴虫/念珠菌性阴道炎、阴道  
微生态平衡等检测一步到位

## 检测指标



**过氧化氢**

辅助诊断: 阴道微生态环境



**白细胞酯酶**

辅助诊断: 阴道炎



**唾液酸苷酶**

辅助诊断: 细菌性阴道病 (BV)



**乙酰氨基葡萄糖苷酶**

辅助诊断: 滴虫性阴道炎、  
念珠菌性阴道炎



**脯氨酸氨基肽酶**

辅助诊断: 细菌性阴道病 (BV)



**pH值**

反映阴道微生态平衡

## 产品优势

01 灵敏度高

03 快速, 15分钟解读结果

02 操作简单

04 高效, 一次测定, 6项结果

## 临床应用



滴虫性阴道炎筛查及预后



念珠菌阴道炎筛查及预后



细菌性阴道病筛查及预后



提示阴道炎症状况



阴道微生物状态评估

## 操作步骤

01

### 稀释加样

用样品稀释液洗下取样拭子上的样品，并滴加到试剂孔上，1分钟内判读PH孔结果。

02


### 显色终止

在“唾液酸苷酶”孔加显色液， $37 \pm 1^\circ\text{C}$ 孵育15分钟后，往“乙酰氨基葡萄糖苷酶”孔滴加终止液。

03

### 结果判读

根据比色卡判断除pH反应孔外的其他五孔的结果。

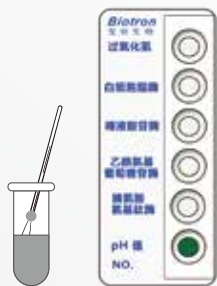

## 产品信息

产品名称	包装规格
细菌性阴道病联合检测试剂盒(干化学酶法)	100人份/盒
	20人份/盒

粤械注准20182400802



广州市宝创生物技术有限公司

地址:广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C6栋301室、401室

电话: 020-32077730 / 020-32077731 传真: 020-32077729 网址: www.ebiotron.com